



Povrchové čistenie a dezinfikovanie

- manuálne - striekaním dezinfekčných prostriedkov alebo otieraním dezinfekčnými utierkami
- automatické - v umývacích a dezinfekčných automatoch, termodezinfektoroch.



MELAclean - umývací a dezinfekčný automat



Steelco - termodezinfektor



Upozornenie : Kolienkové násadce a turbíny sa nesmú vkladať do nádob s dezinfekčnými prostriedkami. Pred každým dezinfekčným alebo sterilizačným programom musia byť kolenkové násadce a turbíny ošetrené originál KaVo sprejom.

Ošetrovanie a mazanie


1.) - KaVo sprejom



- alebo KaVo ROTA sprejom



- alebo v automate KaVo QUATTROcare

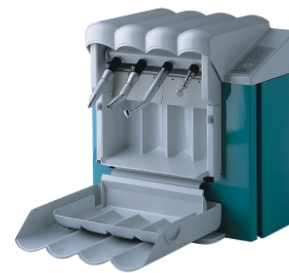

Kolienkový násadec alebo turbínu vložte do Cleanpack sáčku alebo do buničiny a nasadte na vhodnú trysku podľa typu pripojenia. Stlačte sprej až pokiaľ nebude vytekať čistý olej z hlavičky.



Kolienkový násadec



Turbína na rýchlospojku



Typ MIDWEST



Typ BORDEN




Kolienkové násadce a turbíny ošetrujte 2x denne (napoludnie a po ukončení praxe) a pred každou sterilizáciou.

2.) Ošetrovanie a mazanie upínacej klieštinky

Najmenej 1x za týždeň ošetríte aj upínaciu klieštinku. Nasadíte INTRA adaptér s tryskou KaVo spreja do upínacieho otvoru a stlačíte sprej pokiaľ z opačného konca hlavičky nebude vytekať prebytočný, čistý olej.



Upozornenie : Je nevyhnutné, aby ste každý ošetrený kolenkový násadec a turbínu vložili do stojana na násadce hlavičkou hore. Používajte len originál KaVo sprej. Nedostatočná starostlivosť môže mať za následok znehodnotenie alebo zníženie životnosti kolenkových násadcov a turbíniiek.

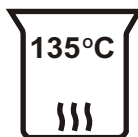

Sterilizácia

Zabaľte kolenkový násadec alebo turbínu samostatne do vhodného sterilizačného sáčku a vložte do sterilizátora. Kolienkové násadce a turbíny sa môžu sterilizovať v autoklávoch do 135°C.



VACUKLAV 31B autokláv od firmy MELAG



STATIM 2000S a 5000S kazetový autokláv od firmy SciCan



Upozornenie : Po každom sterilizačnom programe sa musia kolenkové násadce a turbíny vybrať zo sterilizátora inak hrozí nebezpečenstvo korózie.