



Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod k použití, který je součástí dodávky, a dodržujte v něm uvedené pokyny. Zvláštní pozornost přitom věnujte bezpečnostním pokynům.

Popis výrobku

Prášek KaVo PROPHYflex Perio Powder se používá pro subgingivální ošetření včetně léčeb parodontidy a periimplantitidy.

Prášek KaVo PROPHYflex Perio Powder je určen k použití v práškových tryskacích přístrojích běžných na trhu. Při použití přístroje se prosím řiďte příslušným návodem k použití.

Tento návod k použití uschovávejte po celou dobu používání výrobku.

Aplikace

Tento prášek odstraňuje subgingivální biofilm a doporučuje se pro následující čistící postupy:

- Odstranění parodontálního biofilmu.
- Uchování implantátů (včetně leštění titanem).
- Pro další ošetření po první aplikaci v parodontální léčbě.



Konkrementy a zubní kámen pomocí prášku KaVo PROPHYflex Perio Powder odstraňovat nelze.

Pokyny pro léčbu


V případě plochých parodontálních kapes (až 5 mm) postříkujte zub z každé strany max. po dobu 5 sekund na každou kapsu.



Paprsek přitom nenasměřujte na jeden bod, nýbrž hýbejte jím v kruhu, abyste tak docílili rovnoměrného čištění.



Úhel hrotu násadce vůči zubu může ležet v rozmezí 30° až 60°. Čím menší je úhel, tím hlubší je vstříkávání prášku do kapsy.

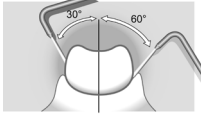

Kontraindikace



Pacienti trpící chronickou bronchitidou nebo astmem se v žádném případě nesmí ošetřovat práškovým tryskacím přístrojem. Paprsek ze vzduchu a prášku by mohl vyvolat potíže s dýcháním.



Náchylné osoby mohou reagovat citlivě na glycin. Pokud zpozorujete alergické reakce, tak léčbu a použití výrobku přerušete a prášek z úst úplně odstraňte.



Léčba hlubokých parodontálních kapes může vést k bakteriemi. Proto prosím mějte na vědomí nezbytná omezení pro ošetřování rizikových pacientů (všeobecně oslabený imunitní systém, endokarditida).



Nenasměřujte práškový paprsek na zubní výplně či korunky a můstky, jelikož restaurace by tím mohly být poškozeny.

Pokyny pro léčbu



Pacient a zubař musí nosit ochranu zraku.



Zubař musí nosit ústenku a rukavice.



Používejte velkou odsávací kanylu Vaší zubařské soupravy.



Na rty pacienta naneste Vaseline®.



Po použití glycinového prášku si umyjte ruce.



Po použití glycinového prášku očistěte obličej pacienta (např. vlhkou utěrkou).

Všeobecné informace

- Nepřekročujte na zásobníku uvedenou maximální výšku plnění práškem.
- Tento prášek neobsahuje cukr.

Skladování a trvanlivost



Skladovací teplota: -10 °C až +25 °C (14 °F až +77 °F)

Převavní teplota: -10 °C až +60 °C (14 °F až +140 °F)



Chraňte před vlhkostí.



Relativní vlhkost vzduchu: 5 % až 95 %, nekondenzující.



Tlak vzduchu: 700 hPa až 1060 hPa (10 psi až 15 psi).



Dbejte na datum trvanlivosti

Symbyly



Značka GOST.



Dodržujte návod k použití.



Recyklovatelný.



Značka CE (Communauté Européenne). Výrobek s touto značkou odpovídá a příslušné směrnice ES.



Výrobce.



Datum výroby.



Výrobní šarže.



Množství.



Nepoužívejte opakovaně – pouze k jednorázovému použití



Prášek KaVo PROPHYflex Perio Powder před použitím protřepejte.

- Neskladujte prášek v blízkosti zdrojů tepla.
- Skladování při -10°C až 25°C a 10% až 95% relativní vlhkosti vzduchu.
- Prášek před použitím protřepejte
- Nádobku s práškem po použití zase uzavřete víčkem.
- Prášek je použitelný po dobu 2 let. Nepoužívejte prosím po upřesnění datumu trvanlivosti.

Pro supragingivální ošetření je také k dostání:

- Prášek PROPHYflex Pulver® v provedeních Orange (obj. č. 1.007.0014), Berry (obj. č. 1.007.0015), Cherry (obj. č. 1.007.0016) a Mint (obj. č. 1.007.0017).
- PROPHYpearls® (obj. č. 1.002.0342).